

# PROTOCOLO QUIRURGICO SISTEMA PRO.IM.PRO

## SECUENCIA FRESADO RECOMENDADO:

En caso de trabajar en hueso, D1 o D2

Fresa Lanza de  $\varnothing$  1,80 dependiendo el largo total del implante, ejemplo:

Implante longitud 10mm: Profundizar con la fresa lanza 10mm.

Implante longitud 12mm: Profundizar con la fresa lanza 12mm.

## SECUENCIA FRESADO RECOMENDADO:

En caso de trabajar en hueso, D3 o D4

Fresa Lanza de  $\varnothing$  1,80 dependiendo el largo total del implante, ejemplo:

Implante longitud 10mm: Profundizar con la fresa lanza 8mm.

Implante longitud 12mm: Profundizar con la fresa lanza 10mm.