




PM-1357

Protocolo Quirúrgico

Sistema PRO.IM.PRO.

www.implantesfia.com/proimpro

Diámetro (∅) 2.20mm.	Secuencia de Fresado: Recomendada (Hueso D1 o D2)	Secuencia de Fresado: Recomendada (Hueso D3 o D4)
	<p>Fresa lanza de 1.80mm. dependiendo del largo total del implante - <u>Ejemplo:</u></p> <p><u>Implante Long. 10mm.:</u> - Profundizar con la Fresa Lanza 10mm.</p> <p><u>Implante Long. 12mm.:</u> - Profundizar con la Fresa Lanza 12mm.</p>	<p>Fresa lanza de 1.80mm. dependiendo del largo total del implante - <u>Ejemplo:</u></p> <p><u>Implante Long. 10mm.:</u> - Profundizar con la Fresa Lanza 6mm.</p> <p><u>Implante Long. 12mm.:</u> - Profundizar con la Fresa Lanza 8mm.</p>