





PM-1357

# Protocolo Quirúrgico

## Sistema PRO.IM.RE.

[www.implantesfia.com/proimre](http://www.implantesfia.com/proimre)


Diámetro (ø) 3.00mm.	Secuencia de Fresado: <b>Recomendada</b> (Hueso D1 o D2)	Secuencia de Fresado: <b>Recomendada</b> (Hueso D3 o D4)	Secuencia de Fresado: <b>Opcional</b>
	Fresa lanza de 1.80mm.	Fresa lanza de 1.80mm.	Fresa lanza de 1.80mm.
	Fresa cónica de ø3.00 según longitud de implante.	Fresa cónica de ø3.00 según longitud de implante.	Profundizar hasta la mitad de la longitud del implante con: Fresa helicoidal de ø2.50 - por ultimo ø2.80.
Diámetro (ø) 4.00mm.	Secuencia de Fresado: <b>Recomendada</b> (Hueso D1 o D2)	Secuencia de Fresado: <b>Recomendada</b> (Hueso D3 o D4)	Secuencia de Fresado: <b>Opcional</b>
	Fresa lanza de 1.80mm.	Fresa lanza de 1.80mm.	Fresa lanza de 1.80mm.
	Fresa helicoidal de 2.20mm.	Fresa helicoidal de 2.20mm.	Fresa helicoidal de 2.20mm.
	Fresa cónica de ø3.00 según longitud de implante. Fresa cónica de ø3.50 según longitud de implante Fresa cónica de ø4.00 según longitud de implante.	Fresa cónica de ø4.00 según longitud de implante.	Profundizar hasta la mitad de la longitud del implante con: Fresa helicoidal de ø2.50 - ø2.80 - ø3.00 - ø3.30 y por ultimo Avellanador de 4.00.

### PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACION DEL IMPLANTE CORRESPONDIENTE:

Se retira el Implante del envase, se presenta en el lecho quirúrgico ajustandolo con el soporte plástico del cual viene montado, insertandolo inicialmente por lo menos dos vueltas.

Luego terminar roscando con la Llave Intermediaria que calza en el cuadrado de 2.20mm x 2.20mm.

Continuar con las indicaciones post instalación.